

CONSIGNES SUR LE PORT ET LE LAVAGE DU MASQUE REUTILISABLE




Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières.

Consignes de port du masque réutilisable



1. Lavez-vous soigneusement les mains avant de mettre le masque

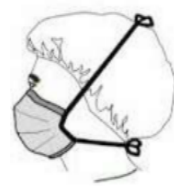

2. Mettez votre masque d'abord en nouant la cordelette supérieure un peu en arrière du sommet du crâne et ensuite **la cordelette inférieure derrière le cou**

3. Le masque doit être ajusté en exerçant de petites pressions avec les doigts tant au niveau du nez qu'au niveau des pommettes. Le masque doit absolument couvrir le nez et le menton.



Une fois votre masque en place, vous ne devez pas toucher votre masque pendant toute la durée du port sinon vous risquez de vous contaminer

4. Avant d'enlever votre masque, lavez-vous soigneusement les mains

5. Enlevez le masque en dénouant les liens sans toucher la partie qui couvre le visage



6. Une fois votre masque enlevé, lavez-vous soigneusement les mains



Une barbe (même naissante) réduit l'étanchéité du masque au visage et diminue son efficacité globale

Consignes pour le lavage du masque réutilisable

- ✓ **Entretien du masque** : Après chaque utilisation, le masque doit être lavé.
- ✓ **Explication sur la méthode de lavage** : Lavage en machine avec détergent classique. Séchage en tambour. Repassage à 120°C max.
- ✓ **Stockage** : Une fois lavé, le masque doit être stocké dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.